



# Kit di verifica per Eroina Bianca

KIT PER LA RILEVAZIONE DI DROGHE

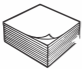


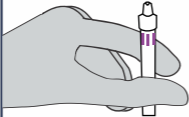

DR-2000



**Leggere  
prima  
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi quando si maneggiano sostanze stupefacenti e si utilizzano unità di test. Se si verifica una fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Questo test consta di una provetta. Dato che la provetta contiene abbastanza liquido per testare molti campioni, non smaltire la provetta fino a quando tutti i campioni desiderati non sono testati. Per ulteriori test con la stessa provetta, prendere un nuovo foglio di carta da test dal blocchetto per testare il successivo campione.

Preparazione del Test	Sostanza		Tracce
	<b>1</b> Rimuovere un foglio di carta da test dal blocchetto.	<b>2</b> Toccare con la carta da test la sostanza sospetta.	Strofinare la carta da test sopra la superficie sospetta.
			
Identificazione	<b>3</b> Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando la fiala non si rompe.	<b>4</b> Applicare una goccia alla carta da test.	
			

## ATTENZIONE:

**Il reagente nella provetta contiene un acido.  
Evitare il contatto del reagente con la pelle.**

Risultati



La comparsa di un colore viola entro un minuto indica la presenza di un oppiaceo come **Eroina, Morfina o Codeina**.



Se non si sviluppa alcun colore viola, non sono presenti né Eroina, né Morfina né Codeina.

Smaltimento



Quando giunge il momento di smaltire la provetta, diluire con acqua il reagente residuo prima di gettarlo nella spazzatura.



Dopo aver diluito il reagente con l'acqua, la provetta può essere smaltita in sicurezza nella spazzatura.

**IDenta**  
Leader mondiale nei  
prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd  
www.identa-corp.com  
Tecnologia brevettata  
Prodotto in Israele

LOT: DR2054920A

EXP: 12/2022