

SWIPPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE DI DROGHE

Kit di Screening Generale delle Droghe

SW-9000




**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Preparazione del Test

1

Rimuovere il tappo dello SWIPPER™ dall'unità di test.

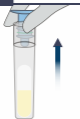

Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale per evitare che la fiala cada dalla provetta.

2


Campionare la sostanza sospetta con il tappo dello SWIPPER™.



Preparazione del Test

3

Rimettere il tappo dello SWIPPER™ nella provetta. Premere con decisione.

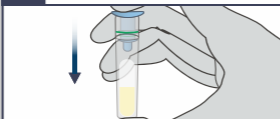

STOP

Non continuare a meno che il tappo dello SWIPPER™ e l'O-ring verde non siano adeguatamente fissati.

Identificazione


4

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando l'ampolla non si rompe.



5

Agitare delicatamente il test su e giù per assicurarsi che il liquido tocchi il tappo.

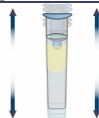

Risultati

La comparsa di un colore rosso-porpora al viola indica la presenza di una delle seguenti droghe:



Eroina, Anfetamina, Metanfetamina, Ecstasy /MDMA, Bazedrone, Bufedrone, Carfentanil, Catinone, DMT, EAPB, Fentanil, Ketamina, LSD, mCPP, MDMAI, MDPBP, MDPV, Mefedrone, Metadone, Methcatinone, Metilone, Mexedrone, PCP, MPA, Pentedrone, Pentilone, PMA, PMMA, Psilocibina, 2-amminoindano (2-AI), altre droghe sintetiche.



La comparsa immediata di un colore verde, celeste, blu-verde o blu indica la presenza di **Cocaina** o **Crack**.



Se non si sviluppa alcuno dei suddetti colori, le droghe sopra elencate **non** sono presenti.

Smaltimento

Il kit può essere smaltito in sicurezza nei rifiuti.

IDenta
Leader mondiale nei
prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Tecnologia brevettata
Prodotto in Israele

LOT:

EXP: